

nenor[®]

Aria






Table of contents

Spis treści

- 4** Instrukcja obsługi
- 5** User manual
- 7** Bedienungsanleitung
- 9** Návod k použití
- 10** Használati utasítás
- 12** Používateľská príručka
- 14** Användarhandbok
- 15** Käyttäjän käsikirja
- 17** Brukerhåndbok
- 19** Brugermanual
- 20** Gebruikershandleiding
- 22** Manual del usuario
- 24** Manuale utente
- 25** Manuel de l'utilisateur
- 27** Manual de utilizare

A

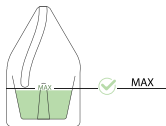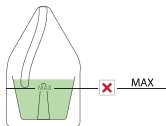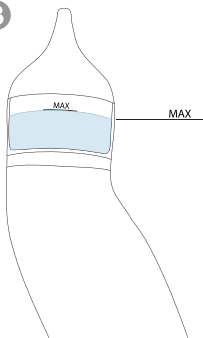

B**C**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

zakupiony przez Ciebie produkt Neno Aria to elektroniczny aspirator, służący do odsysania wydzieliny z dziecięcego noska. Urządzenie jest dostosowane do pracy z noworodkami i dziećmi od pierwszego dnia do 6 roku życia.

Przed użyciem urządzenia, prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt nie jest zabawką – nie pozwól dzieciom bawić się nim. Produkt przeznaczony do obsługi przez osoby dorosłe
2. Produkt posiada małe elementy, które zagrażają dziecku udławieniem.
3. Przetestuj siłę zasysania na grzbiecie dłoni osoby dorosłej przed użyciem.
1. Korzystaj z przewodu USB dołączonego w zestawie by upewnić się, że napięcie ładowania jest zgodne z parametrami urządzenia. Nie podłączaj urządzenia do napięcia wyższego niż określone w specyfikacji – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i grozi pożarem lub eksplozją.
4. Nie ładuj urządzenia w czasie użytkowania.
5. Jeżeli nie korzystasz z urządzenia trzymaj je z dala od dzieci.
6. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu (przynajmniej 3 miesiące), naładuj w pełni jego akumulator przed przechowywaniem.
7. Odłącz aspirator od ładowania, jeżeli bateria jest naładowana, niezaoszczędzenie się grozi wybuchem.
8. Nie rozkładaj urządzenia ani nie podejmuj jego samodzielnych napraw. W razie usterek, skontaktuj się z punktem serwisowym.
9. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli w nosie można dostrzec rany lub objawy zapalenia śluzówki.
10. W przypadku gorączki, zakażenia, podrażnienia lub krwawienia noska, przestań korzystać z urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
11. Nie używaj tego produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
12. Nie używaj tego produktu na uszach, ustach ani oczach.
13. Aspirator jest produktem higienicznym. Służy tylko i wyłącznie do czyszczenia dziecięcego noska z naturalnie powstałej wydzieliny. Urządzenie nie powinno być stosowane w przypadku choroby dziecka.
14. Jeśli niemowlęta i małe dzieci źle się poczują podczas korzystania z tego urządzenia, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

02. OPIS URZĄDZENIA

PATRZ RYS. A

1. Silikonowa końcówka 2mm
2. Silikonowa końcówka 3mm
3. Wyciągany pojemnik
4. Baza aspiratora
5. Wskaźnik trybu zasysania (Silny, Umiarkowany, Delikatny)
6. Przycisk zasilania/ zmiany trybu
7. Przycisk do start/stop

03. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Aspirator
2. Kończówka 2mm
3. Kończówka 3mm
4. Pojemnik
5. Kabel USB-C
6. Woreczek do przechowywania
7. Instrukcja

04. INSTALACJA:

1. Nałóż wyciągany pojemnik na górną część bazy aspiratora i dociśnij dobrze, tak, żeby pojemnik dobrze przylegał do bazy aspiratora.
2. Wybierz odpowiednią końcówkę silikonową i umieść ją na pojemniku.

05. WSKAŹNIK AKUMULATORA:

1. Przycisk zasilania/ zmiany trybu podczas gdy urządzenie jest włączone podświetla się informując o aktualnym stanie naładowania akumulatora:
 - Zielone światło – stan baterii 31%-100%
 - Pomarańczowe światło 11%-30%
 - Czerwone światło 4%-10%
 - Czerwone światło migające 1%-3%
2. W trybie czuwania urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie.
3. Uwaga: Baterii nie można ładować w sposób ciągły, w przeciwnym razie może ona ulec łatwemu uszkodzeniu. Tuż po zakończonym ładowaniu baterii odepnij urządzenie od zasilania.
4. Podczas ładowania światło informuje o statusie:
 - Czerwone światło- bateria w trakcie ładowania, obecny stan 0-30%
 - Zielone światło migające- bateria w trakcie ładowania, obecny stan 31-99%
 - Zielone światło- bateria naładowana, odepnij zasilanie

06. SILIKONOWE KOŃCÓWKI:

1. Końcówka 2mm- przeznaczona dla dzieci od urodzenia do 2 roku życia
2. Końcówka 3mm- przeznaczona dla dzieci od 2 do 6 roku życia

07. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Złóż urządzenie zgodnie z instrukcjami w dziale „instalacja”. Upewnij się, że pojemnik oraz silikonowa końcówka zostały poprawnie zamontowane na aspiratorze.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ zmiany trybu, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij go ponownie, aby zmienić poziom ssania, aż do wybrania preferowanego trybu:
 - Tryb Delikatny- podświetlona 1 dioda wskaźnika trybu zasilania
 - Tryb Umiarkowany- podświetlone 2 diody wskaźnika trybu zasilania
 - Tryb Silny- podświetlone 3 diody wskaźnika trybu zasilania
3. Przed użyciem aspiratora na dziecku, przetestuj siłę urządzenia na wierzchu swojej dłoni.
4. Trzymaj dziecko w pozycji pionowej i włóż końcówkę aspiratora do nozdrza, tak aby uszczelnić nozdrze. **PATRZ.RYS.B**
5. Należy uważać, aby nie włożyć końcówki aspiratora zbyt głęboko do nozdrza i nie naciskać na wewnętrzną ścianę nozdrza.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start-stop, aby odessać i usunąć śluz. Odsysanie działa tylko w momencie trzymania przycisku start/stop.
7. Odsysaj tylko przez kilka sekund w nozdrzu, a następnie powtarzaj w razie potrzeby.
8. Aby uniknąć nierównowagi ciśnienia błony bębenkowej spowodowanej podciśnieniem, dzieci nie powinny wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani przetykać podczas używania tego produktu.
9. Używanie po zapełnieniu pojemnika z pełnym pojemnikiem może spowodować zalanie silnika wydzieliną i uszkodzenia urządzenia. Zawsze opróżniaj pojemnik, jeżeli widzisz, że nieczystości w zbiorniku zbliżają się do linii MAX. **PATRZ.RYS.C**
10. Zawsze po skończonym korzystaniu z urządzenia ściągaj pojemnik i wyczyść. Odłożenie urządzenia z pełnym pojemnikiem może spowodować przelanie się wydzieliny i wciągnięcie do wnętrza urządzenia przy kolejnym uruchomieniu.
11. W trybie czuwania urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie.

08. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Końcówki i pojemnik na wydzielinę muszą być wyciągnięte z urządzenia i oddzielnie umyte. Należy je przepłukać pod bieżącą wodą z użyciem szczoteczki i łagodnego płynu do mycia.
2. Końcówki i pojemnik mogą zostać zdezynfekowane w wodzie o temperaturze

100°C nie dłużej niż 10 minut.

3. Zawsze myj silikonową końcówkę i pojemnik po użyciu.
4. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są suche przed ponownym montażem, by zapobiec gromadzeniu się bakterii oraz zalaniu silnika.
5. Nie korzystaj z materiałów ściernych ani żrących środków czystości przy czyszczeniu urządzenia. Może to negatywnie wpłynąć na jego żywotność i działanie.
6. Wyłącz urządzenia w czasie czyszczenia.
7. Nie zanurzaj urządzenia pod wodą.
8. Bazę aspiratora czyść tylko przy użyciu czystej, wilgotnej szmatki.

09. SPECYFIKACJA:

Wejście: 5V 1A | **Moc:** 5 W | **Akumulator:** Litowy 3.7V, 1100mAh | **Maksymalne ciśnienie ujemne:** 58 kPa | **Materiał końcówek:** silikon | **Poziom hałasu:** ≤59 dB | **Czas ładowania:** około 2,5 godziny | **Czas pracy urządzenia:** do 2 godzin | **Waga:** 133g | **Wymiary:** 103x51x42 mm

10. KARTA GWARANCYJNA:

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/gwarancja> Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/kontakt>
Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

EN

USER MANUAL

neno[®]

Producent:

KGK TREND Sp. z o.o.
(dawniej KGK Trade Sp. z o.o. Sp. K.)
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków, Polska.
Wyprodukowano w PRC

Manufacturer:

KGK TREND Sp. z o.o.
(formerly KGK Trade Sp. z o.o. Sp. K.)
st. Ujastek 5b, 31-752 Cracow, Poland.
Made in PRC

